



BiOHealth®



This diagram shows the exploded view of a vacuum cleaner. The components are numbered as follows:

- 1: Motor unit with wheels and power cord
- 2: Lower dust container
- 3: Upper dust container
- 4: Filter
- 5: Motor unit (top part)
- 6: Motor unit (bottom part)
- 7: Motor unit (top part)
- 8: Motor unit (bottom part)
- 9: Motor unit (top part)
- 10: Motor unit (bottom part)
- 11: Motor unit (top part)
- 12: Motor unit (bottom part)
- 13: Motor unit (top part)
- 14: Motor unit (bottom part)

STT	Nội dung phân	Chức năng	Khả năng chịu nhiệt	Số lượng
1	Nắp đáy	PP	-20 ~ 120°C	2
2	Đệm massage	Silicone	-20 ~ 120°C	2
3	Phiếu hút	PP	-20 ~ 120°C	2
4	Nắp xi lanh	PP	-20 ~ 120°C	2
5	Vòng hút	Silicone	-20 ~ 120°C	2
6	Van	PP	-20 ~ 120°C	2
7	Bình thu sữa	PP	-20 ~ 120°C	2
8	Máy hút	ABS	-20 ~ 120°C	2
9	Mũ bảo vệ bình	PP	-20 ~ 120°C	2
10	Ống hút	PVC	-20 ~ 120°C	2
11	Nắp bình sữa	PP	-20 ~ 120°C	2
12	Nắp chống tràn	PP	-20 ~ 120°C	2
13	Đầu ti giả	Silicone	-20 ~ 120°C	2
14	Nắp đáy đầu ti	PP	-20 ~ 120°C	2

1. Màn hình LCD

2. Nút tăng lực hút (+)

3. Nút giảm lực hút (-)

4. Nút chuyển chế độ

5. Màn hình LCD

Nhấn nút ON/OFF , máy khởi động và mặc định ở chế độ kích thích tức thời. Màn hình hiện thị ký hiệu .

Với lực hút nhẹ, máy sẽ massage và kích thích bầu ngực.

Điều chỉnh lực hút thích hợp bằng cách nhấn các nút +/-, có 5 mức.

Khi sờ bắt đầu chảy ra, nhấn nút .

Màn hình hiển thị ký hiệu .

Máy chuyển sang chế độ hút sữa, với 9 mức độ và nhịp hút khác nhau, thay đổi bằng cách nhấn các nút +/-.

Hoạt động êm ái

Được phát triển dựa trên những nghiên cứu mới nhất về tiếng ồn động cơ, sản phẩm AE Basic là máy hút sữa êm ái hàng đầu thị trường, hoàn toàn phù hợp để mẹ dễ dàng hút sữa vào ban đêm.

Chế độ kích thích tiết sữa

Màn hình LCD hiển thị đầy đủ các thông số cường độ và thời gian hút khí máy hoạt động.

Lựa chọn nguồn điện linh hoạt

Sản phẩm này tương thích với nhiều nguồn điện khác nhau như cổng USB của máy tính, sạc dự phòng hoặc sử dụng 4 pin alkaline.

Công suất	5W
Nguồn điện	AC110-220V/DC5V
Cường độ hút	80-300 mmHg
Điều chỉnh lực hút	9 mức độ
Bảo hành	2 năm

1. Rửa và tiệt trùng bộ phận hút trước khi sử dụng.
2. Kiểm tra lại dây dẫn khí, dây dẫn điện và ổ cắm.

1. Rửa tay sạch sẽ, khử trùng bình sữa và các phụ kiện trước khi tiến hành hút sữa. Lắp ráp các bộ phận theo hướng dẫn.
2. Mát xa hoặc làm ấm bầu ngực bằng một chiếc khăn ấm trong vài phút để kích thích tuyến sữa.
3. Áp sát đầu vú với vòm mềm mắt xa vào bầu ngực, tạo lực hút, ngồi nghỉ và thư giãn. Hơi cần người về phía trước. Luôn phải thay đổi giữa hai bên ngực để mỗi lần hút một bên không quá 10 phút. Nếu không có sữa chảy ra trong 5 phút, hãy dừng hút và thử lại vào lúc khác. Hoặc hỏi ý kiến bác sĩ chuyên môn.

1. Thao rời hết các bộ phận có tiếp xúc với bầu ngực và sữa (trừ thân bơm).
2. Tiệt trùng các bộ phận sau khi làm vệ sinh.
3. Lau sạch thân bơm bằng một mảnh vải sạch sau khi sử dụng.
4. Không ngâm thân bơm và adapter vào nước.
5. Khi tháo rời hay lắp ráp các bộ phận, hãy tuân theo đúng thứ tự trong hướng dẫn này.

Lắp đệm mắt xa thật sát vào phễu hút.

Lắp vòng hút vào phễu, sau đó ấn xi lanh vào phễu hút đến khi nghe một tiếng "tách" nhẹ.

Cảm ơn bạn đã chọn mua sản phẩm của Bio Healthy Life Technology.
Vui lòng bảo quản kỹ hóa đơn mua hàng và Hướng dẫn sử dụng - Thẻ
bảo hành này và mang theo khi có yêu cầu bảo hành.

Tên khách hàng:		Điện thoại:	
Tên sản phẩm:		Mã sản phẩm:	
Ngày mua hàng:			
Đại lý bán hàng:			

1. Sản phẩm này được bảo hành 24 tháng. Xin liên hệ với nơi mua hàng hoặc nhà phân phối (Công ty Cổ phần Thiết Bị Sinh) khi có nhu cầu bảo hành.
2. Bảo hành này không bao gồm:
 - Các hư hỏng gây ra bởi việc sử dụng sai, hư hỏng do rơi vỡ, bảo dưỡng không đúng cách hoặc do sự can thiệp của bên thứ ba.
 - Sử dụng phụ kiện không thích hợp hoặc không chính hãng.
3. Người sử dụng chịu mọi trách nhiệm và rủi ro trong quá trình sử dụng sản phẩm.
4. Tiêu hủy sản phẩm: Tuân theo hướng dẫn của nhà chế tạo trách sại đối với việc tiêu hủy các thiết bị điện.
5. Cảnh báo: Không được tự ý thay đổi bất cứ thành phần nào của thiết bị.

