


成品尺寸：90x140mm




Máy hút sữa điện tử hai bình IE Basic

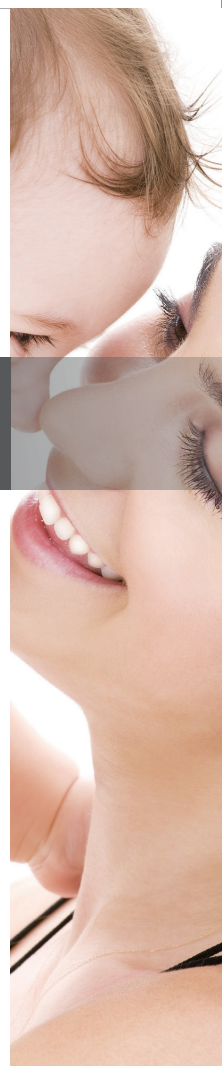




Các bộ phận của máy hút sữa điện tử IE Basic

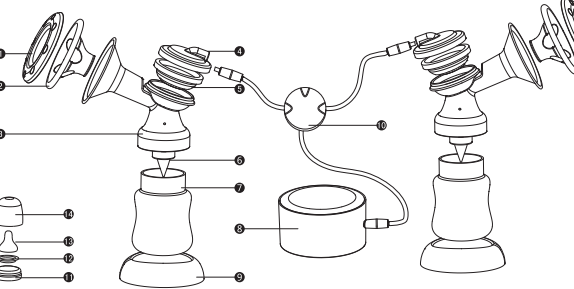

STT	Tên bộ phận	Chất liệu	Khoảng chịu nhiệt	Số lượng
1	Nắp dây	PP	- 20 ~ 120°C	2
2	Đệm massage	Silicone	- 20 ~ 120°C	2
3	Phễu hút	PP	- 20 ~ 120°C	2
4	Nắp xi lanh	PP	- 20 ~ 120°C	2
5	Vòng hút	Silicone	- 20 ~ 120°C	2
6	Van	Silicone	- 20 ~ 120°C	4
7	Bình trữ sữa	PP	- 20 ~ 120°C	2
8	Máy hút	ABS	- 20 ~ 120°C	1
9	Đế giữ bình	PP	- 20 ~ 120°C	2
10	Ống hơi	Silicone	- 20 ~ 120°C	1
11	Nắp bình sữa	PP	- 20 ~ 120°C	2
12	Nắp chống tràn	PP	- 20 ~ 120°C	2
13	Đầu ti giả	Silicone	- 20 ~ 120°C	2
14	Nắp dây đầu ti	PP	- 20 ~ 120°C	2

Mô tả chức năng các nút trên bảng điều khiển

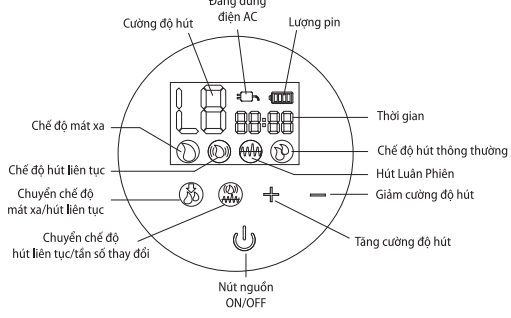

Hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển

Nhấn nút ON/OFF  , màn hình LED hiển thị  ,  , +, -. Nhấn nút  nhiều lần, mỗi lần nhấn sẽ chuyển đổi giữa chế độ mát xa và chế độ hút bình thường. Màn hình hiển thị  khi ở chế độ mát xa và hiển thị  khi ở chế độ hút bình thường.

Nhấn nút  nhiều lần sẽ chuyển đổi giữa chế độ hút liên tục và chế độ hút luân phiên. Màn hình hiển thị  khi ở chế độ hút liên tục và hiển thị  khi ở chế độ hút luân phiên.

Chế độ mát xa: là chế độ kích thích sự tiết sữa, màn hình hiển thị  , máy hoạt động với lực hút nhẹ nhàng, mát xa và kích thích bầu ngực. Bạn có thể điều chỉnh lực hút thích hợp bằng cách nhấn các nút +/-, có tất cả 6 mức độ hút ở chế độ mát xa.

Chế độ hút bình thường: ở chế độ hút sữa, màn hình hiển thị ký hiệu  . Có 9 mức độ và nhịp hút khác nhau, thay đổi bằng cách nhấn các nút +/-. Chế độ hút liên tục: Khi chuyển sang chế độ hút liên tục, màn hình hiển thị ký hiệu  , máy sẽ tăng tốc độ để hoàn thành quá trình hút sữa. Bạn có thể tùy chỉnh 6 mức tốc độ khác nhau với các nút +/-. Chế độ hút với nhịp độ thay đổi: Khi chuyển sang chế độ hút với nhịp độ thay đổi, màn hình hiển thị ký hiệu  , máy sẽ kích thích bầu ngực với nhịp độ hút thay đổi liên tục. Nhấn nút +/- để thay đổi mức thay đổi nhịp độ hút, với 9 mức tùy chỉnh khác nhau.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



4 chế độ hút khác nhau: Chế độ mát xa, Chế độ hút thông thường (9 mức cường độ), Chế độ hút liên tục, Chế độ hút luân phiên (tính năng mới)
Chức năng ghi nhớ lựa chọn của người dùng



Màn hình LED cảm ứng với các nút nhấn được mô tả bằng ký hiệu đơn giản dễ hiểu.



Sử dụng pin sạc Lithium (cung cấp đủ cho 3,5h hoạt động khi sạc đầy pin)
Có thể sử dụng nguồn điện từ cổng USB và adapter.



Áp lực hút: 80 - 300 mmHg



An toàn, thoải mái
Sử dụng loại nhựa không có chứa BPA tuyệt đối an toàn.
Em ái khi vận hành, không lo bé thức giấc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Công suất	5W
Nguồn điện	AC110-220V/DC5V
Cường độ hút	80-300 mmHg
Điều chỉnh lực hút	9 mức độ
Bảo hành	2 năm

TRƯỚC KHI HÚT SỮA

1. Rửa và tiệt trùng bộ phận hút trước khi sử dụng.

2. Kiểm tra lại dây dẫn khí, dây dẫn điện và ổ cắm.


THAO TÁC HÚT SỮA

1. Rửa tay sạch sẽ, khử trùng bình sữa và các phụ kiện trước khi tiến hành hút sữa. Lắp ráp các bộ phận theo hướng dẫn.


2. Mát xa hoặc làm ấm bầu ngực bằng một chiếc khăn ấm trong vài phút để kích thích tuyến sữa.

3. Áp sát phễu hút với đệm mát xa vào bầu ngực, tạo lực hút, ngồi nghỉ và thư giãn. Hơi cúi người về phía trước. Luân phiên thay đổi giữa hai bầu ngực để mỗi lần hút một bên không quá 10 phút. Nếu không có sữa chảy ra trong 5 phút, hãy dừng hút và thử lại vào lúc khác. Hoặc hỏi ý kiến bác sĩ chuyên môn.


CÁC BƯỚC LẮP MÁY HÚT SỮA

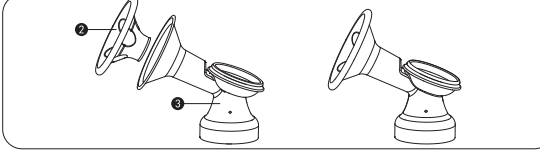


Lắp đệm mát xa thật sát vào phễu hút.

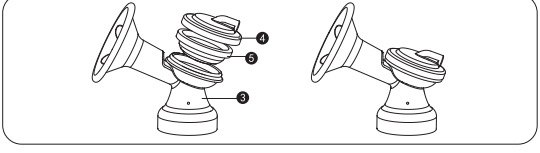

Lắp vòng hút vào phễu, sau đó ấn xi lanh vào phễu hút đến khi nghe một tiếng "tách" nhẹ.

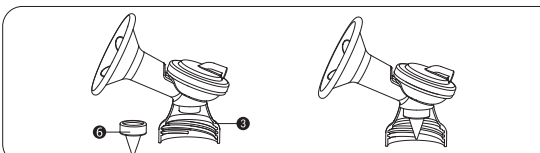

Lắp van bơm vào phần dưới phễu hút. Lưu ý: Van bơm là bộ phận quan trọng và dễ bị hư hỏng, nhẹ tay khi lắp đặt.

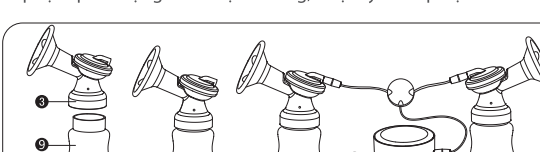

Lắp bộ phễu hút vào bình trữ sữa, nối bộ phễu - bình đã được lắp ghép hoàn chỉnh với thân bơm bằng ống dẫn khí.

THẺ BẢO HÀNH

Cám ơn bạn đã chọn mua sản phẩm của Bio Healthy Life Technology. Vui lòng bảo quản kỹ hóa đơn mua hàng và Hướng dẫn sử dụng - Thẻ bảo hành này và mang theo khi có yêu cầu bảo hành.

Tên khách hàng:		Điện thoại:	
Tên sản phẩm:		Mã sản phẩm:	
Ngày mua hàng:			
Đại lý bán hàng:			

LƯU Ý:

1. Sản phẩm này được bảo hành 24 tháng. Xin liên hệ với nơi mua hàng hoặc nhà phân phối (Công ty Cổ phần Thiết Bị Y Sinh) khi có nhu cầu bảo hành.

2. Bảo hành này không bao gồm:
- Các hư hỏng gây ra bởi việc sử dụng sai, hư hỏng do rơi vỡ, bảo dưỡng không đúng cách hoặc có sự can thiệp của bên thứ ba.
- Sử dụng phụ kiện không thích hợp hoặc không chính hãng.

3. Người sử dụng chịu mọi trách nhiệm và rủi ro trong quá trình sử dụng sản phẩm.

4. Tiêu hủy sản phẩm: Tuân theo hướng dẫn của nhà chức trách sở tại đối với việc tiêu hủy các thiết bị điện.

5. Cảnh báo: Không được tự ý thay đổi bất cứ thành phần nào của thiết bị.

BioHealth

BIO HEALTHY LIFE TECHNOLOGY PTY LTD
9A, 139 Minjungbal Dr. Tweed Heads South NSW., 2486 Australia
Tel: (+61) 283 115 567
www.bio-healthy.asia | info@bio-health.asia