



SCF 394/11

MÁY HÚT SỮA ĐIỆN ĐÔI



- ✓ **Mã sản phẩm:**
 - SCF 394/11-Sử dụng điện trực tiếp hoặc pin sạc
- ✓ **Thương hiệu:** Anh Quốc
- ✓ **Sản xuất:** Hungary
- ✓ **Bảo hành:** 2 năm từ ngày mua hàng và không quá 3 năm từ ngày sản xuất



SCF 394/11

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- **Tiện dụng:** **Có thể dùng điện trực tiếp hoặc pin sạc.** Chỉ cần sạc 4 giờ cho 3 lần hút sữa
- **Tự nhiên:** Công nghệ hút sữa mô phỏng theo chu kỳ bú và nuốt sữa tự nhiên: tạo ra dòng sữa nhanh và hiệu quả cho mẹ cảm giác thoải mái và tự nhiên hơn
- **Dễ chịu:** Lớp đệm silicon mềm mại, kích thước 30mm có thể co giãn linh hoạt, vừa khít với 99.98% kích thước bầu ngực mẹ
- **Tiện lợi:** Thiết kế phễu hút giúp mẹ có thể ngồi hút sữa ở tư thế thoải mái, mẹ không cần ngồi thẳng. Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng
- **Linh hoạt :** 8 cấp độ mát xa và 16 cấp độ hút giúp mẹ có thể dễ dàng lựa chọn cấp độ thoải mái nhất cho mình
- **Thông minh:** Tự động chuyển chế độ mát xa sang hút sau 90 giây
- **Màn hình đèn Led có hiển thị thời gian và cấp độ bằng số** giúp mẹ dễ dàng sử dụng
- **Động cơ nhỏ gọn, vận hành yên tĩnh:** giúp mẹ có thể sử dụng ngay cả khi bé đang ngủ
- **Thiết kế van cao su** có tay cầm giúp vệ sinh và tháo lắp dễ dàng hơn



TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Công nghệ chuyển động tự nhiên cho dòng sữa nhanh chóng *

Vắt nhiều sữa hơn trong thời gian ngắn hơn * với tấm đệm giúp kích thích vú mẹ vắt sữa giống như em bé. Nó điều chỉnh liên mạch từ chế độ kích thích sang chế độ biểu hiện 'và chỉ áp dụng lượng kích thích và hút núm vú phù hợp để có dòng sữa tối đa

Đệm mát xa silicon mềm mại, đàn hồi, dễ dàng uốn cong phù hợp với mọi kích thước và hình dạng bầu ngực mẹ đệm silicone nhẹ nhàng uốn dẻo và điều chỉnh để vừa với núm vú của bạn. Nó phù hợp với **99,98%** kích thước núm vú * (lên đến 30mm).

Tư thế hút sữa thoải mái, không cần ngồi thẳng đứng

Hút sữa mà không cần nghiêng người về phía trước
Cảm thấy thư thái khi hút sữa nhờ thiết kế cho phép bạn ngồi thẳng lưng thay vì phải cúi người về phía trước.
Dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng sản phẩm với 20 người tham gia (2019); 90% người tham gia nhận thấy tư thế diễn đạt thoải mái (điện đơn); 95% người tham gia thấy tư thế thể hiện thoải mái bằng điện đôi



Nhiều cấp độ hút và mát xa cho mẹ dễ dàng lựa chọn.
Máy hút sữa có 8 cấp độ mát xa và 16 chế độ hút sữa giúp mẹ có nhiều lựa chọn hơn.



Tự động chuyển chế độ hút sau 90 giây. Chế độ ghi nhớ cài đặt cuối cùng

Sau 90 giây, máy tự động chuyển từ chế độ mát xa sang hút. Máy có chế độ tự động nghỉ nhớ cài đặt cuối cùng giúp tiết kiệm thời gian. Trước khi chuyển về chế độ đã được ghi nhớ yêu thích, **máy sẽ tăng chế độ dần dần để mẹ không cảm thấy đau tức ngực**



Tích hợp nút nguồn và tạm dừng

Khi đang sử dụng, muốn tạm dừng mẹ chỉ cần bấm vào nút nguồn. Khi muốn tắt máy mẹ giữ nút 3 giây là máy tự động tắt.





Động cơ yên tĩnh. Dây nguồn dài 3m

Động cơ yên tĩnh giúp mẹ có trải nghiệm kín đáo ở bất cứ đâu- ngay cả khi bé đang ngủ



Thiết kế 2 túi đựng: túi to giữ nhiệt và túi nhỏ giúp dễ dàng bảo quản, sắp xếp các bộ phận của máy

CÁC BỘ PHẬN

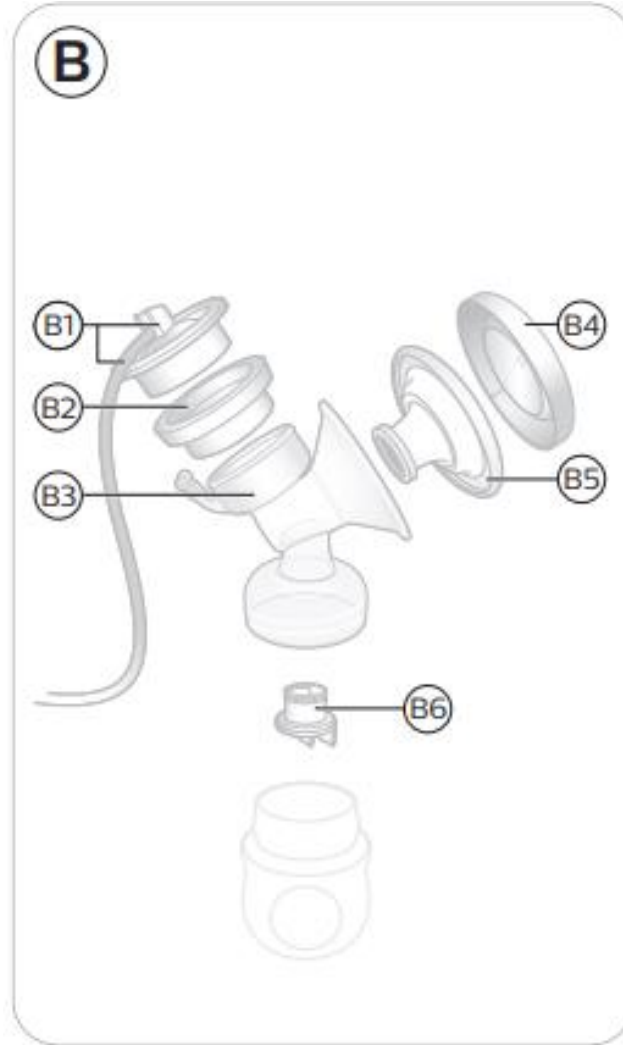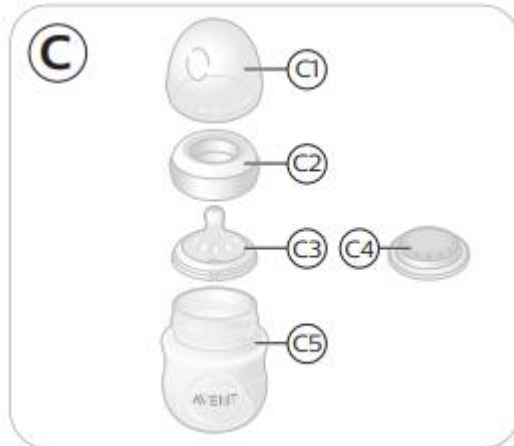

A-Bộ phận chính

A1: Mô tơ

A2: Bộ phận hút sữa x 2

A3: Bình sữa MPTN x 2

A4: Dây nguồn

B-Bộ phận hút sữa

B1: Dây hút silicon và nắp đậy

B2: màng chắn chống khuẩn

B3: Thân bộ phận hút

B4: Nắp đậy vệ sinh

B5: Đệm mát xa silicon

B6: Van 1 chiều

C-Bình sữa MPTN

C1: Nắp đậy

C2: Cổ bình

C3: Núm ty

C4: Nắp phụ

C5: Bình sữa


CÁC BỘ PHẬN



SCF 394/11


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG- ĐỘNG CƠ

ĐỘNG CƠ

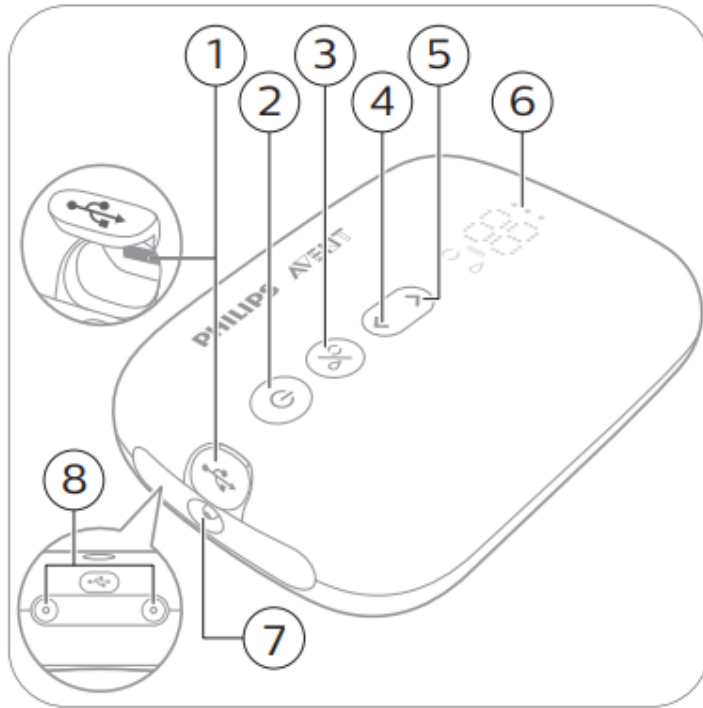

- 1- Đầu vào nguồn USB
- 2- Nút bật / tắt với chức năng tạm dừng / phát
- 3- Nút đổi chế độ hút sữa/mát xa
- 4- Nút giảm
- 5- Nút tăng
- 6- Màn hình đèn LED
- 8- lỗ cắm dây hút

MÀN HÌNH ĐÈN LED

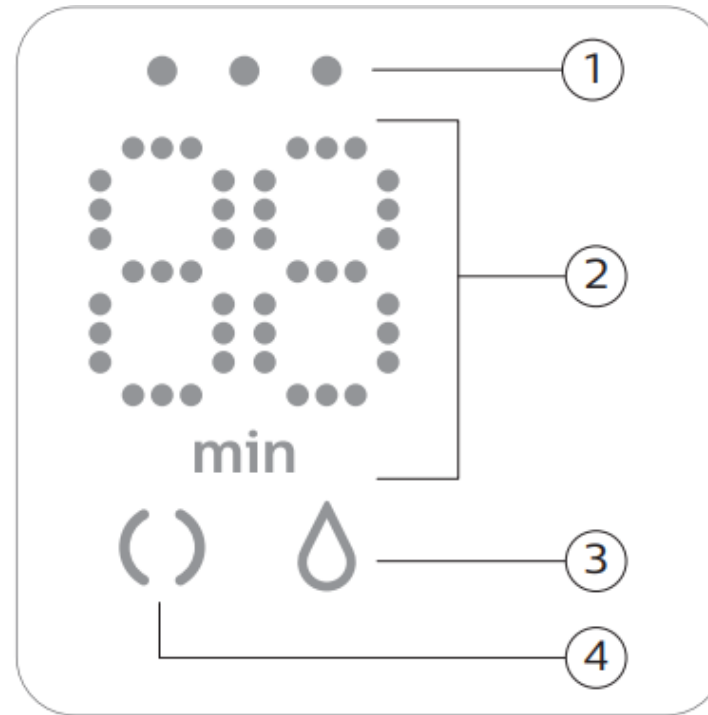

- 1- Đèn báo pin
- 2- Hiển thị thời gian sử dụng và cấp độ hút/Massage
- 3- Chế độ massage
- 4- Chế độ hút sữa




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ HÚT

Đèn báo	Chế độ	Giải thích	Số cấp độ
	Mát xa 	Chế độ mát xa, kích sữa	8 cấp độ
	Hút sữa 	- Chế độ hút sữa hiệu quả nhất khi sữa bắt đầu chảy - Máy tự động chuyển từ chế độ mát xa sang hút sữa sau 90 giây	16 cấp độ




- Các con số hiển thị thời gian sử dụng (phút)

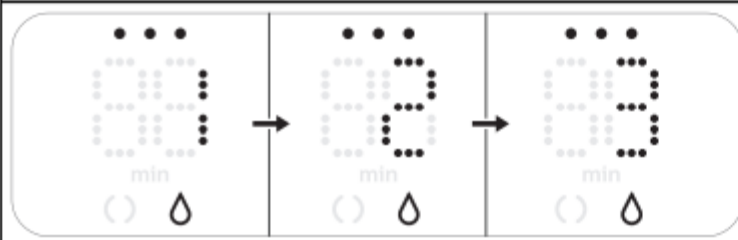

- Khi thay đổi chế độ/cấp độ hút, màn hình sẽ hiển thị chế độ/cấp độ hút.
- Sau đó vài giây, màn hình sẽ quay lại chế độ hiển thị thời gian sử dụng



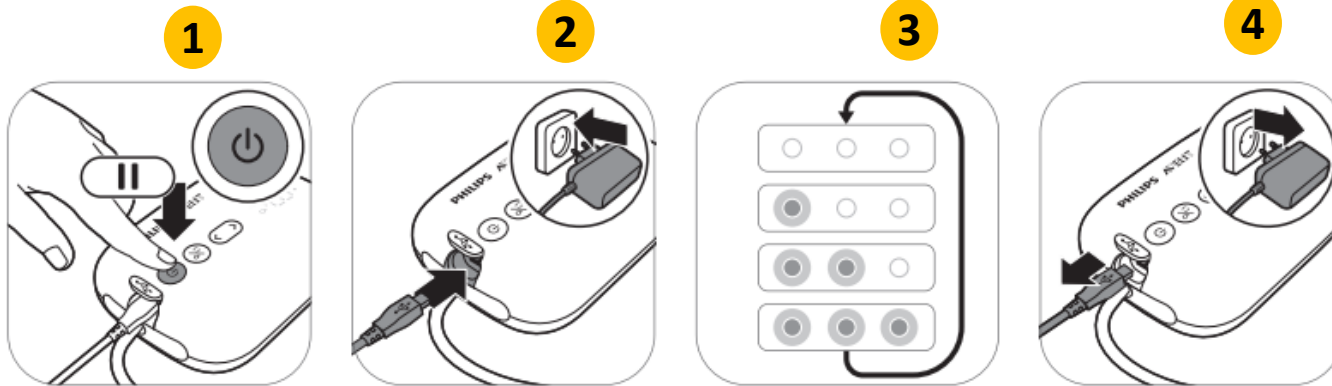

1. Tắt nguồn mô tơ
 2. Cắm phích vào điện và cắm giắc nhỏ vào mô tơ máy
 3. Pin đang sạc: sạc đầy pin **khoảng 4 giờ, cho tối đa 3 lần hút sữa**
 4. Khi đã sạc đầy pin rút dây khỏi nguồn điện và mô tơ máy
- LƯU Ý:** Chỉ sử dụng sạc bằng dây sạc đi kèm máy

ĐÈN BÁO PIN



SÁNG 3 ĐÈN

→ Pin được sạc đầy

SÁNG 1-2 ĐÈN

→ Đã sạc đủ cho 1-2 lần dùng (tương ứng số đèn)

ĐÈN NHẮP NHÁY CHẬM

→ Pin yếu, cần sạc

ĐÈN NHẮP NHÁY NHANH

→ Pin rất yếu, motor sắp ngừng hoạt động

ĐÈN CÙNG SÁNG VÀ CÙNG TẮT

→ Pin đang sạc

CÁCH LẮP ĐẶT



1. Vệ sinh sạch sẽ tay trước khi sử dụng



2. Đặt van trắng vào thân bộ phận hút



3. Vặn bình sữa vào thân bộ phận hút



4. Lắp đệm mát xa vào thân bộ phận hút
Chú ý: dùng ngón ty đẩy phần bên trong đệm mát xa sát chỗ có mũi tên



5. Lắp màng chắn chống khuẩn vào thân bộ phận hút.
Chú ý: dùng tay ấn khít vành màng chắn vào thân bộ phận hút



6. Lắp nắp màng chắn và dây hút.
Chú ý đẩy nắp xuống khít với màng chắn chống khuẩn



7. Lắp đầu dây hút còn lại vào mô tơ



8. Lắp dây nguồn vào mô tơ và kết nối nguồn điện



9. Máy đã sẵn sàng hoạt động




Nếu chưa sử dụng ngay, có thể đẩy nắp nhựa vào phễu hút để giữ vệ sinh



CÁCH VỆ SINH -TIỆT TRÙNG

- ✓ Tháo rời các bộ phận để vệ sinh trước lần dùng đầu tiên hoặc sau mỗi lần sử dụng
- ✓ Sử dụng nước rửa bình chuyên dụng để làm sạch các bộ phận và rửa lại bằng nước sạch
- ✓ Khử trùng bằng nước sôi hoặc sử dụng máy tiệt trùng hơi nước ở nhiệt độ 120°C
- ✓ Động cơ máy: dùng khăn ẩm để vệ sinh bên ngoài

1

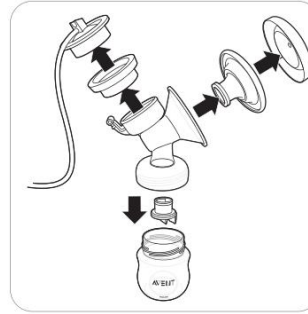

2

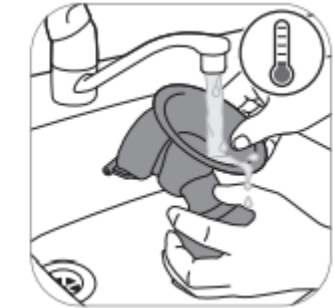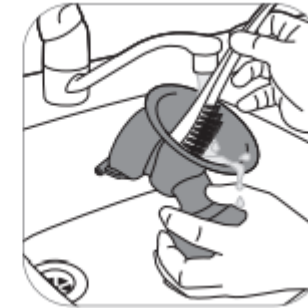

3



Tôi không thấy máy hoạt động khi bấm nút nguồn?

➔ Khi bấm nút nguồn cần giữ 3 giây máy mới bắt đầu hoạt động

SCF 394/11: Có thể máy bị hết pin. Sử dụng bộ sạc đi kèm để sạc đầy pin

➔ Nếu máy không lên nguồn mà không phát hiện ra được lỗi bất thường nào, vui lòng mang ra các trung tâm bảo hành của Philips để được hỗ trợ kiểm tra

Tôi đang hút sữa thì máy tự động ngắt?

➔ **SCF 394/11:** có thể dung lượng pin không đủ để duy trì nên máy tự động ngắt. Trước khi ngắt, trên màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng pin nhấp nháy nhanh.

➔ Nếu hút sữa liên tục trên 40 phút, máy cũng sẽ tự động ngắt do được thiết kế chức năng tự bảo vệ động cơ.

➔ Nếu máy tự động ngắt mà không phát hiện ra được lỗi bất thường nào, các mẹ vui lòng mang ra các trung tâm bảo hành của Philips để được hỗ trợ kiểm tra

Tôi thấy lực hút của máy yếu?

- ➔ kiểm tra xem đã dùng đúng chế độ và tốc độ. Máy có chế độ mát xa và hút. Đặc điểm chế độ mát xa có lực hút yếu và nhịp nhanh còn chế độ hút có lực hút mạnh và nhịp chậm hơn. Chế độ mát xa có 8 cấp độ, chế độ hút có 16 cấp độ. Các mẹ kiểm tra lại thao tác sử dụng
- ➔ Nếu máy đang hoạt động bình thường, nếu động cơ đột nhiên yếu hơn thì có thể do van cao su bị rách. Các mẹ kiểm tra và thay mới.
- ➔ Nếu kiểm tra máy và không phát hiện ra bất thường nào, các mẹ vui lòng mang ra các trung tâm bảo hành của Philips để được hỗ trợ kiểm tra

CÁCH VỆ SINH VAN CAO SU

- ✓ Cần tháo rời van khỏi phễu hút khi vệ sinh. Khi tháo/lắp cần sử dụng tay cầm của van để giữ vệ sinh và tránh van bị hỏng/rách
- ✓ Vệ sinh van cao su nhẹ nhàng bằng cách nước rửa bình sữa
- ✓ Kiểm tra thường xuyên van chắn để chắc chắn không bị rách, thủng
- ✓ Nếu phát hiện van chắn bị rách, thủng cần thay thế bằng sản phẩm mới.

Kiểm tra van
Đảm bảo không rách/thủng



Vị trí tay cầm để lắp van

Động cơ máy có gây tiếng ồn không?

- ➔ Động cơ được thiết kế vận hành tĩnh lặng, giảm tiếng ồn 1 cách tối đa, không gây khó chịu cho mẹ và có thể hút sữa ngay cả khi bé đang ngủ.
- ➔ Trường hợp tiếng ồn bất thường trong quá trình sử dụng, các mẹ nên tắt máy và mang ra các trung tâm bảo hành của Philips để được hỗ trợ kiểm tra

Phễu hút của máy hút sữa Philips Avent mấy size?

- ➔ Phễu hút của máy hút sữa có 1 size tiêu chuẩn. Phễu hút phù hợp với **99,98%** kích thước núm vú * (lên đến 30mm).

Tôi có thể vừa nằm vừa hút sữa được không?

- ➔ Máy hút sữa điện Philips Avent không hỗ trợ cho tư thế nằm hút nhưng mẹ có thể ngồi hút rất thoải mái, không cần phải ngồi thẳng đứng như một số dòng trên thị trường mà không lo sữa bị trào ra ngoài. **Dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng** sản phẩm với 20 người tham gia (2019); 90% người tham gia nhận thấy tư thế diễn đạt thoải mái (điện đơn); 95% người tham gia thấy tư thế thể hiện thoải mái bằng điện đôi

Tôi sử dụng máy thấy đau ngực và không kiệt sữa?

➔ Để sử dụng máy hút hiệu quả nhất, các mẹ nên làm theo các bước sau

- ✓ Mát xa ngực trước khi hút sữa
- ✓ Khi bắt đầu hút, đảm bảo đầu ngực được đặt vào trung tâm phễu hút.
- ✓ Khi hút sữa bằng máy, mẹ nên chọn tư thế ngồi thoải mái nhất, thư giãn đầu óc.
- ✓ Thời gian mỗi cữ vắt tối thiểu là 20 phút - tối đa 30 phút. Nếu hút quá lâu hoặc quá mạnh sẽ làm tổn thương đầu ti. **Trong 20 phút thì nên hút theo lịch 2-5-2-5-2-5, nghĩa là mát xa 2 phút, hút bình thường 5 phút, rồi lại chuyển chế độ mát xa để kích sữa tiếp.**
- ✓ Chọn cấp độ hút khiến mẹ cảm thấy thoải mái
- ✓ Nếu ngực mẹ căng sữa mà hút liên tục trong 5 phút vẫn không ra được sữa nào thì nên ngừng hút và mát xa bằng tay cho ngực thật mềm sau đó mới sử dụng máy hút.
- ✓ Cho bé bú hoặc hút sữa thường xuyên từ 2-3 giờ /lần. Mẹ nên hút sữa đúng giờ theo lịch cố định hàng ngày sẽ tạo ra 1 phản xạ tự nhiên có điều kiện, cứ đến giờ hút mẹ sẽ có cảm giác sữa về mặc dù con không bú hay không cần massage.

THANK YOU