

daiviet



THƯƠNG HIỆU VÌ CỘNG ĐỒNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **GHẾ MASSAGE**

SẢN PHẨM ĐƯỢC
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

1TỶ TRỊ GIÁ
ĐỒNG

NẾU KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

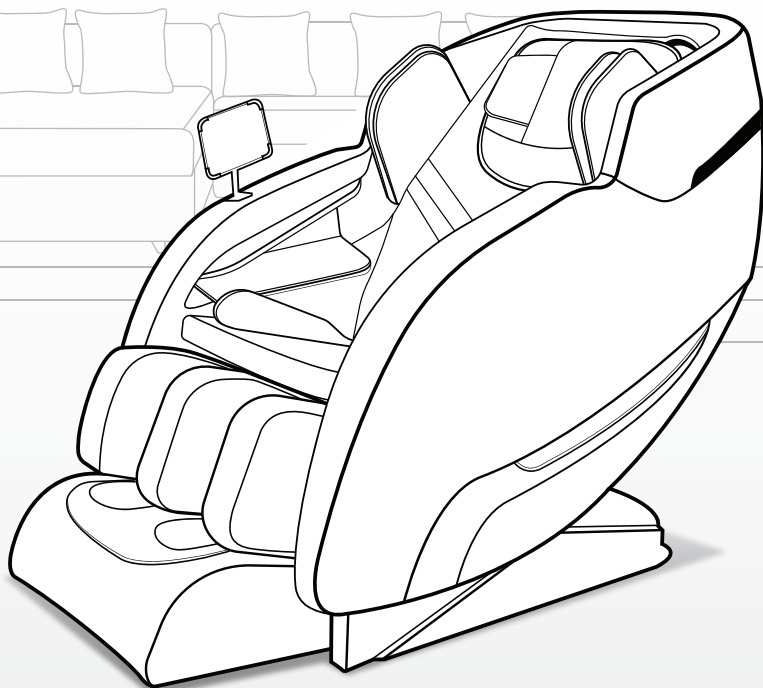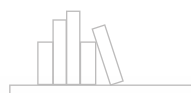

MODEL: DVGM-0001D/DKGM-0001D/MKGM-0001D

- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để vận hành đúng cách.
- Vui lòng giữ lại sách để tham khảo khi cần.

MỤC LỤC

I. CẢNH BÁO AN TOÀN	04
II. THÔNG SỐ SẢN PHẨM	06
III. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	07
IV. CẤU TRÚC	09
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	10
VI. CHĂM SÓC VÀ BẢO TRÌ	13
VII. GIẢI QUYẾT SỰ CỐ	14
VIII. BẢO HÀNH VÀ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ	15

I. CẢNH BÁO AN TOÀN

- Đọc tất cả cảnh báo một cách cẩn thận trước khi sử dụng
- Các biện pháp phòng ngừa và cảnh báo được liệt kê dưới đây để chắc chắn sử dụng thiết bị đúng cách.

NHỮNG NGƯỜI KHÔNG NÊN SỬ DỤNG GHẾ MASSAGE:

Chúng tôi khuyến cáo những đối tượng sau nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng:

- Những người đang sử dụng thiết bị y tế điện tử được gắn trong cơ thể, chẳng hạn như máy trợ tim.
- Những người đang điều trị bệnh, đặc biệt là những người không được khỏe.
- Phụ nữ có thai hoặc đang hành kinh.
- Những người bị loãng xương hoặc gãy xương sống.
- Những người có bệnh về da, hoặc đang bị thương.
- Những người bị sốt cao.
- Cần giám sát chặt chẽ khi sản phẩm này được sử dụng bởi, trên hoặc gần trẻ em, người tàn tật.
- Thiết bị này không được chỉ định sử dụng cho người (gồm cả trẻ em) bị suy giảm thể chất, trí não, hoặc thiếu kiến thức và kinh nghiệm, trừ trường hợp họ được hướng dẫn và giám sát bởi người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHO BỘ ĐIỀU KHIỂN:

- Không vận hành bộ điều khiển hoặc kéo cáp bộ điều khiển bằng tay ẩm.
- Không làm đổ nước hoặc chất lỏng khác lên bộ điều khiển.
- Không đặt vật nặng lên bộ điều khiển.

THẬN TRỌNG TRONG KẾT HỢP NGUỒN VÀ DÂY ĐIỆN:

- Kiểm tra điện áp nguồn trên tem nhãn có tương ứng với điện áp tại địa phương đang sử dụng thiết bị.
- Không dùng tay ẩm rút phích cắm để tránh điện giật.
- Không để các vật nặng hoặc sản phẩm đè lên dây nguồn.
- Không làm hỏng, bẻ cong quá mức, kéo mạnh, xoắn hoặc quấn dây nguồn.
- Nếu dây nguồn cung cấp bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của nhà sản xuất hoặc một người có trình độ tương tự để tránh nguy hiểm.
- Không dùng thiết bị ở nơi có nhiệt độ trên 40°C, không để sản phẩm gần nguồn nhiệt hoặc lửa.
- Không sử dụng thiết bị này trong môi trường ẩm ướt hoặc bụi bẩn, hoặc để tiếp xúc giữa bất kỳ bộ phận nào của thiết bị với môi trường ẩm ướt. Giữ các lỗ thoát khí không có xơ vải, tóc và những thứ tương tự khác.

- Rút phích cắm khỏi ổ cắm khi có sấm sét hoặc bão nhẹ và trước khi lắp hoặc tháo các bộ phận.
- Không sử dụng ngoài trời.
- Đặt sản phẩm trên nền mặt phẳng.
- Rút dây nguồn khỏi thiết bị trước khi bảo trì.
- Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm, chuyển tất cả điều khiển sang chế độ tắt, rút dây nguồn khỏi nguồn điện khi không sử dụng.

NHỮNG LƯU Ý KHÁC CHO VIỆC SỬ DỤNG AN TOÀN:



CHÚ Ý

- Chỉ sử dụng cho những người dưới 90 kg.
- Không sử dụng sản phẩm cho mục đích điều trị bệnh.
- Sản phẩm chỉ được sử dụng bởi một người, không sử dụng cùng một lúc từ hai hay trên hai người để tránh hư hỏng thiết bị.
- Không sử dụng thiết bị ngay sau khi ăn, vì có thể làm bạn không thoải mái.
- Tháo các phụ kiện ra khỏi chỗ để tay và làm trống túi khí khi sử dụng dịch vụ massage.
- Kiểm tra phần bọc dưới đệm và các chỗ khác, ngưng sử dụng nếu có bất kỳ hư hỏng và liên hệ dịch vụ bảo dưỡng chuyên trách để xử lý.
- Nếu bạn cảm thấy khó chịu bất thường trong quá trình vận hành sản phẩm này, hãy tắt nguồn ngay lập tức và không sử dụng sản phẩm.
- Chỉ nên sử dụng thiết bị trong 20 phút mỗi lần
- Đảm bảo không có vật cản phía sau ghế và có đủ chỗ trống phía trước trước khi điều chỉnh chỗ ngồi lưng và góc để chân.
- Đảm bảo không có tải trọng quá mức nào khác đè lên phần tựa lưng hoặc chỗ để chân ngoài người dùng.
- Đảm bảo không có trẻ em, thú cưng hoặc những vật khác dưới chỗ tựa lưng và chỗ để chân.
- Vui lòng ngồi đúng cách trong khi sử dụng thiết bị.
- Không kéo hoặc đẩy ghế hoặc con lăn trên sàn gỗ hoặc thảm để tránh hư hỏng.



NGHIÊM CẤM

- Không sử dụng sản phẩm khi có bất kỳ bộ phận nào của thiết bị hư hỏng, lộ ra hoặc rò rỉ điện.
- Không đứng hoặc đè vật nặng lên vị trí để chân của thiết bị.
- Trẻ em nên được giám sát để đảm bảo không chơi đùa với ghế massage.
- Không ngủ quên trong khi đang vận hành sản phẩm.
- Tránh dùng sản phẩm sau khi đã sử dụng rượu, bia, ...


- Không đặt tay hoặc ngón tay vào bất kỳ khe hở nào của thiết bị để tránh bị thương hoặc làm hỏng thiết bị.
- Nếu có khói hoặc mùi bất thường trong khi sử dụng, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức và rút dây nguồn.

 KHÔNG THÁO RỜI

- Không tự ý tháo rời, sửa chữa sản phẩm. Vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hỗ trợ.


II. THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm	Ghế massage
Model	DVGM-0001D / DKGM-0001D / MKGM-0001D
Điện áp	220V-50Hz
Công suất	90 W

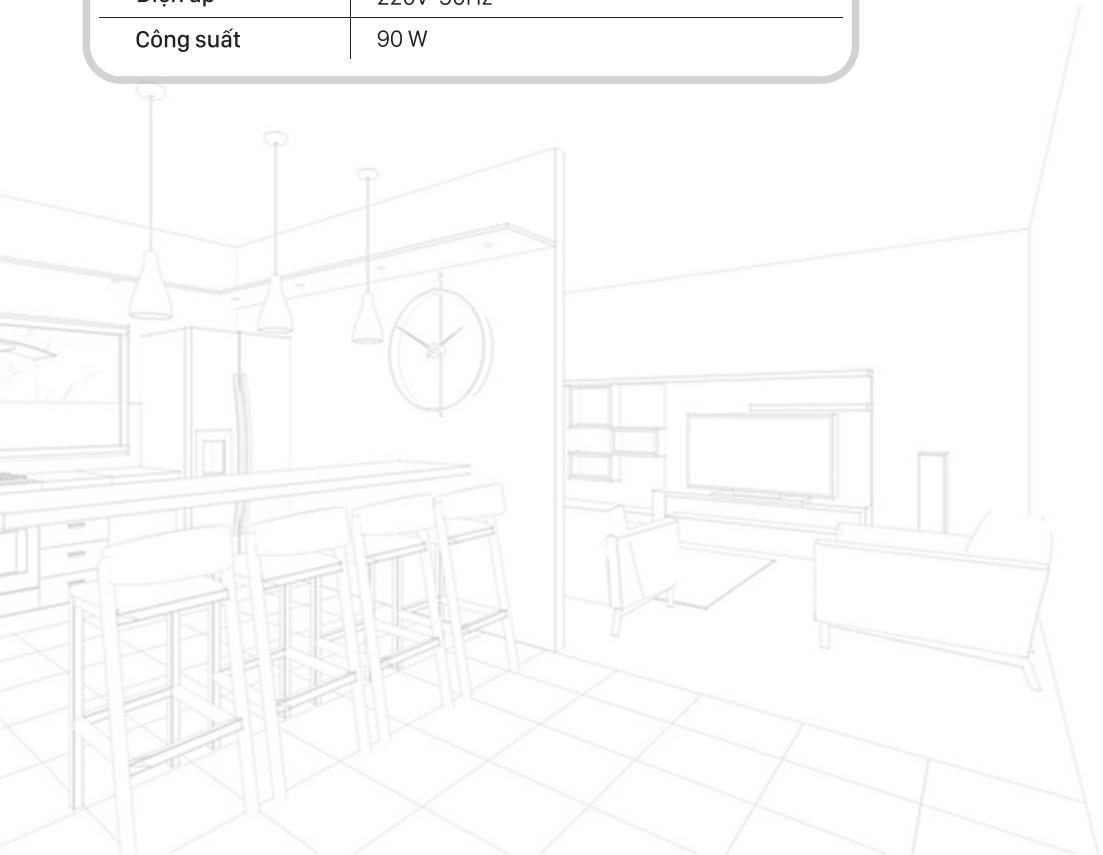

III. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

LẮP ĐẶT GỐI ĐỆM

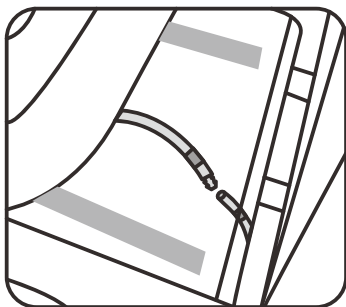

Tháo ống khí ra



Kết nối ống khí


ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ

- Nhấn giữ nút Lên & Xuống để điều chỉnh vị trí thân ghế theo ý muốn.
- Vui lòng bảo đảm có đủ không gian ở trước và sau ghế khi điều chỉnh phần tựa lưng và phần đế chân.

DI CHUYỂN

- Khi di chuyển, nâng phần tay vịn hai bên của ghế, điều này cho phép di chuyển ghế dễ dàng hơn.


Chú ý: Không di chuyển ghế khi ghế đang hoạt động hoặc đang sử dụng. Di chuyển ghế có thể gây hại đến mặt sàn, khuyến cáo sử dụng các biện pháp bảo vệ sàn.

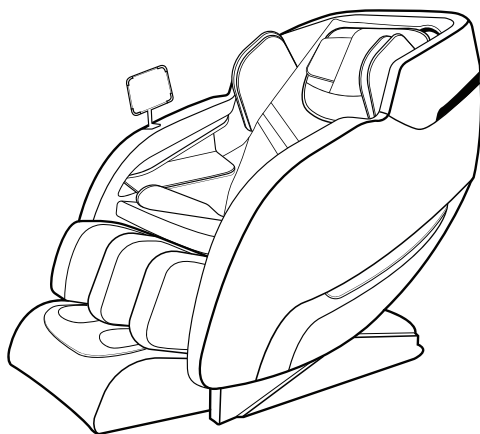

HƯỚNG DẪN ĐẶT GHẾ


Vui lòng để đủ không gian phía trước và phía sau ghế.

- Nơi đặt ghế massage cần đủ không gian cho phần ngả lưng của ghế và nâng lên của chỗ để chân.
- Đảm bảo khoảng trống ít nhất 40 cm phía sau và 40 cm phía trước của ghế massage.
- Bảo đảm không có vật cản phía trước và phía sau ghế.
- Đặt 1 tấm thảm dưới ghế massage để tránh việc nền bị hư hại.

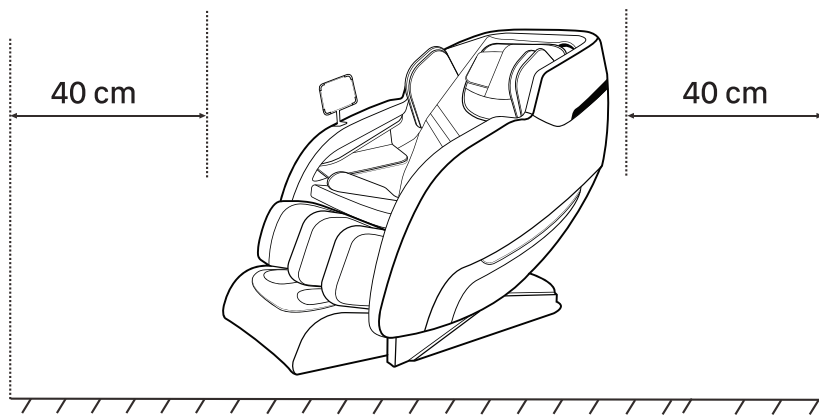

BẬT NGUỒN


- **Bước 1:** Đảm bảo không có vật cản nào xung quanh ghế massage.

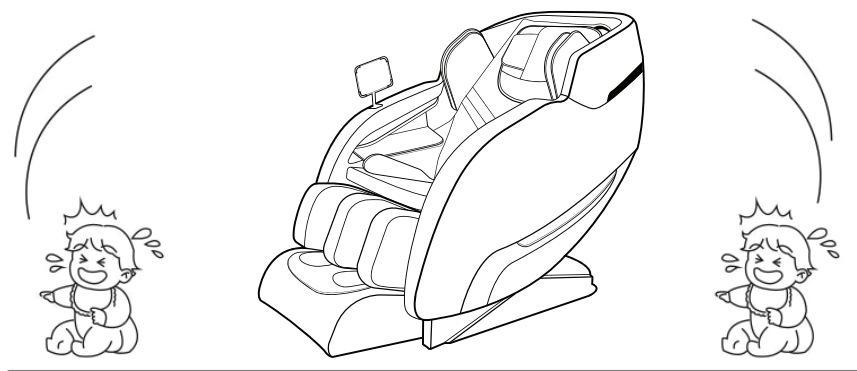

- **Bước 2:** Cắm phích cắm vào ổ cắm điện và bật công tắc nguồn lên


Lưu ý:

- Kiểm tra công tắc nguồn trước khi cắm phích cắm vào ổ điện.
- Đảm bảo công tắc nguồn luôn ở chế độ OFF bất kể khi bạn cắm hoặc rút phích cắm.
- Làm theo tất cả các hướng dẫn để nối dây nối đất phù hợp.
- Cắm phích cắm vào ổ cắm nguồn trước khi khởi động ghế.

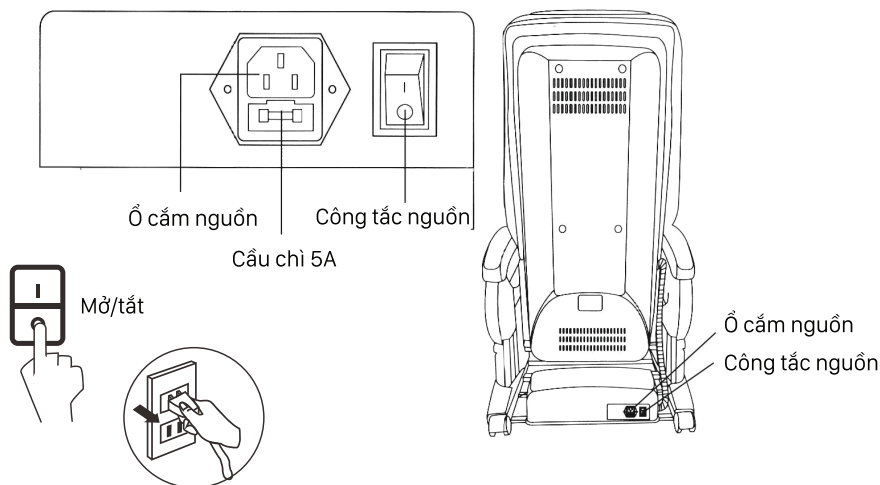


IV. CẤU TRÚC

CẤU TRÚC

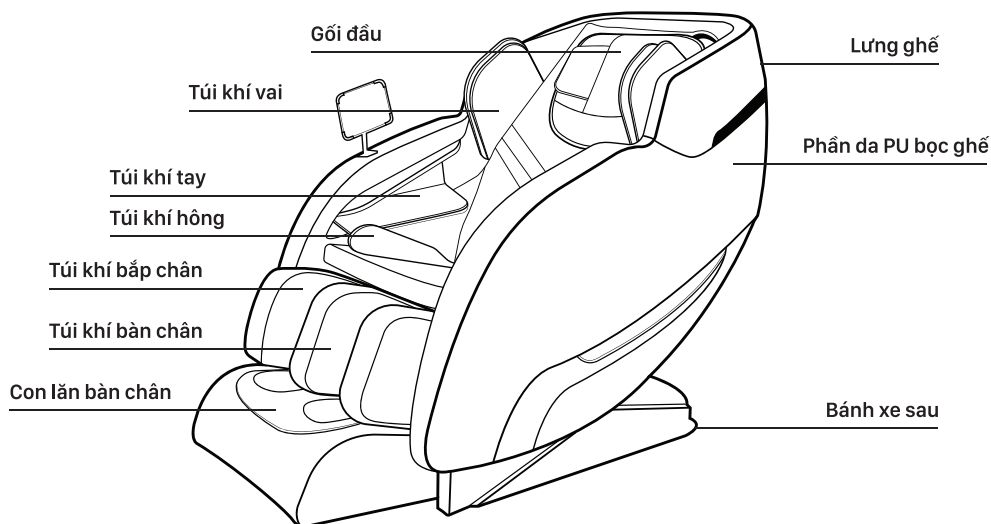

BẢNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

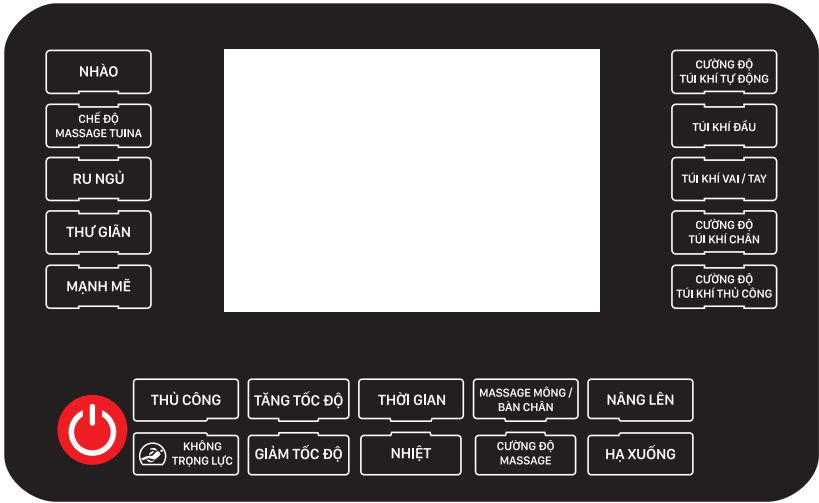

NÚT NGUỒN: Mở/tắt ghế massage bằng cách nhấn nút.

Khi nguồn điện được kết nối, nhấn nút này một lần, ghế massage bắt đầu với chương trình tự động. Có 5 chương trình tự động

.....

1. NHÀO: nhấn nút này, thao tác massage nhào sẽ hoạt động, giúp người dùng thoải mái và thư giãn.

.....

2. CHẾ ĐỘ MESSAGE TUINA: đây là liệu pháp massage cổ truyền tác động lên các kinh mạch và huyết đạo để giúp điều hòa sự cân bằng của khí huyết trong cơ thể.

.....

3. RU NGỦ: Sau khi bắt đầu chương trình này, ghế massage hoạt động với trạng thái thư giãn hoàn toàn, tự nhiên và thoải mái.

.....

4. THƯ GIÃN: Chế độ massage chặt chẽ giúp cơ thể thư giãn thoải mái.

.....

5. MẠNH MẼ: Chế độ này ghế massage sẽ massage sâu vào các điểm huyết đạo để giảm các vị trí đau nhức.

6. CƯỜNG ĐỘ TÚI KHÍ TỰ ĐỘNG: Nhấn nút này ghế massage sẽ thực hiện massage túi khí với cường độ mặc định được lập trình sẵn.

7. TÚI KHÍ MASSAGE ĐẦU: Chức năng này giúp bạn thư giãn và thoải mái hơn.

8. TÚI KHÍ VAI / TAY: Khi ghế massage hoạt động, nhấn nút này để mở/tắt chế độ túi khí vai /tay.

9. CƯỜNG ĐỘ TÚI KHÍ CHÂN: Nhấn nút này để điều chỉnh cường độ túi khí trên chân.

10. CƯỜNG ĐỘ TÚI KHÍ THỦ CÔNG: Nhấn nút này để điều chỉnh cường độ túi khí.

11. THỦ CÔNG: Nhấn nút này để chọn chế độ thủ công: có 5 chế độ thủ công.

12. KHÔNG TRỌNG LỰC: Khi ghế massage đang hoạt động, nhấn nút này để bắt đầu chế độ không trọng lực. Nếu ghế massage đang trong chế độ không trọng lực, nhấn nút này, ghế massage sẽ tự động quay lại tình trạng ban đầu.

13. TĂNG TỐC ĐỘ: Nhấn nút " **TĂNG TỐC ĐỘ** " để tăng tốc độ.

14. GIẢM TỐC ĐỘ: Nhấn nút " **GIẢM TỐC ĐỘ** " để giảm tốc độ.

15. MASSAGE MÔNG / BÀN CHÂN: Nhấn nút này để bắt đầu massage mông và massage con lăn bàn chân

16. NHIỆT: Khi ghế massage đang hoạt động, nhấn nút này để mở/tắt chế độ nhiệt trên thắt lưng.

17. CƯỜNG ĐỘ MASSAGE: Khi ghế massage đang hoạt động, bạn có thể điều chỉnh tốc độ massage của bóng massage trong khi thực hiện các chế độ massage cổ, vai, lưng, eo bằng cách nhấn nút này.

18. THỜI GIAN: Khi ghế massage đang hoạt động, nhấn nút này chế độ thời gian sẽ được cài đặt với việc tăng 5 phút mỗi lần nhấn cho đến tối đa 30 phút.

19. NÂNG LÊN / HẠ XUỐNG: Nhấn nút " **NÂNG LÊN** " ghế massage sẽ được nâng lên.

Nhấn nút " **HẠ XUỐNG** " ghế massage sẽ hạ xuống.

CHUYỂN ĐỔI CHẾ ĐỘ

- **Chế độ tự động:** Ở chế độ tự động, có tổng cộng 5 chương trình để lựa chọn.
- **Chế độ thủ công:** Ở chế độ thủ công, chọn bất kỳ chức năng để massage theo ý thích.
Có 5 chế độ thủ công.

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI BLUETOOTH

- Chức năng Bluetooth được mở đồng thời khi mở máy.
- Mở Bluetooth trên điện thoại để tìm Bluetooth **DV0001D** và kết nối để nghe nhạc.

VI. CHĂM SÓC VÀ BẢO TRÌ

- Để xử lý vết bẩn trên mặt sau, tay vịn, gác chân, các bộ phận bằng nhựa hoặc ống dẫn khí, hãy làm sạch tại chỗ bằng bột tẩy rửa nhẹ, sau đó lau sạch bằng khăn lau khô.
- Để xử lý vết bẩn trên bộ điều khiển, hộp nguồn, hãy lau sạch tại chỗ bằng khăn lau khô.
- Để xử lý vết bẩn trên đệm lưng hoặc gối, hãy lau nó bằng vải ẩm, sau đó để khô trong không khí.
- Để làm sạch tấm phủ bàn chân/bắp chân, hãy tháo nó ra khỏi ghế, rửa bằng nước tẩy rửa nhẹ, sau đó phơi khô.
- Rút dây điện ra khỏi ổ cắm điện trước khi chăm sóc và bảo trì.
- Để tránh bị điện giật, tổn thương, không chạm vào nguồn điện với tay ẩm.
- Đảm bảo không để chất tẩy rửa chạm vào hộp điện khi lau chùi.
- Không sử dụng benzen, chất pha loãng hoặc các dung môi khác trên sản phẩm, nó có thể làm phai màu hoặc làm hỏng sản phẩm.
- Không ủi vải bọc của ghế massage.
- Giữ sản phẩm sạch sẽ, tránh bụi bẩn. Dùng vải bọc sản phẩm nếu không sử dụng trong thời gian dài.
- Không để sản phẩm ngoài trời hoặc dưới ánh sáng mặt trời trong thời gian dài. Điều này có thể gây nên bạc màu hoặc hư hỏng sản phẩm.
- Trong suốt quá trình sử dụng hằng ngày, vui lòng kiểm tra những hiện tượng sau:
 - + Mùi cháy
 - + Các bất thường đối với bật/tắt nguồn khi chạm vào dây nguồn.
 - + Dây nguồn bị nóng
 - + Các triệu chứng bất thường khác.

Ghi chú:

- Vui lòng ngừng sử dụng sản phẩm để tránh sự cố hoặc tai nạn nếu có phát hiện các hiện tượng ở trên. Tắt các nút hoạt động và ngắt kết nối nguồn điện, liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc dịch vụ bảo hành của chúng tôi để hỗ trợ sửa chữa.
- Tất cả các dịch vụ khác ngoại trừ việc chăm sóc và bảo trì ở trên phải được thực hiện bởi một đại lý ủy quyền hoặc trung tâm bảo hành của chúng tôi.
- Rút dây nguồn khỏi các dải nguồn trước khi chăm sóc và bảo dưỡng. Để tránh điện giật hoặc thương tích, không chạm vào dây nguồn và đừng cố gắng tự tháo dỡ hoặc sửa chữa sản phẩm.

VII. GIẢI QUYẾT SỰ CỐ

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Ghế massage không hoạt động sau khi mở nguồn	Kiểm tra xem bảng điều khiển đã mở	Mở bảng điều khiển
	Chưa chọn chức năng massage	Chọn chức năng massage
	Kiểm tra xem kết nối của dây nguồn và ổ cắm có bị lỏng	Bảo đảm dây nguồn và ổ cắm kết nối đúng cách
	Dây và ổ cắm bị hư	Vui lòng liên hệ nhà sản xuất hoặc nhân viên bảo hành để kiểm tra và thay thế
	Cầu chì bị cháy	Thay thế cầu chì tương đương
Có tiếng bíp khi ghế massage hoạt động	Đây là tiếng của bơm hơi, mô tơ, hoặc các bộ phận kỹ thuật	Âm thanh bình thường, không cần quá lưu tâm
Chiều cao khác nhau của con lăn trái và con lăn phải	Con lăn massage hoạt động theo trình tự	Bình thường, không cần lưu tâm
Chức năng massage bất ngờ dừng khi đang hoạt động	Mất nguồn đột ngột	Kết nối lại nguồn điện
	Đến thời gian hẹn giờ	Tắt công tắc nguồn để ghế massage nghỉ trong khoảng nửa tiếng trước khi tiếp tục hoạt động
Ghế không thể quay về vị trí ban đầu	Quá tải	Vui lòng liên hệ nhà sản xuất hoặc nhân viên bảo hành để kiểm tra và thay thế
	Đến thời gian hẹn giờ	Ấn nút Mở/Tắt, ghế sẽ tự động quay về vị trí ban đầu

- Nếu còn gặp các vấn đề khác, vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn và xử lý. Không cố gắng tự sửa thiết bị, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc tổn thương, hư hỏng được gây ra bởi bất cứ sửa chữa hay dịch vụ nào không phải của trung tâm sửa chữa có thẩm quyền.
- Khi không dùng ghế massage trong thời gian dài, nên bao phủ ghế massage lại, cuộn dây điện và đặt ghế ở môi trường không bụi bẩn và ẩm ướt.

VIII. BẢO HÀNH VÀ KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Tất cả sản phẩm phải được kích hoạt bảo hành theo quy định.
- Nếu kích hoạt bảo hành điện tử:
 - 24 tháng đối với linh kiện điện, động cơ, bảng mạch nếu lỗi do nhà sản xuất.
 - 12 tháng đối với phần da nếu lỗi do nhà sản xuất.

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Để đảm bảo quyền lợi bảo hành khi mua bất kỳ sản phẩm thương hiệu **ĐẠI VIỆT**, quý khách hàng vui lòng đăng ký kích hoạt bảo hành điện tử theo những bước sau

Bước 1: Tìm vị trí TEM BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ trên thân của máy.

Bước 2: Cào lớp tráng bạc để xuất hiện MÃ QR và CHUỖI BẢO MẬT.

(Hãy đảm bảo trước khi cào lớp phủ cào còn nguyên vẹn, che phủ 80% mã QR)

Bước 3: Đăng ký bảo hành điện tử qua 2 kênh sau

► Qua kênh ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG

- Thời điểm : ngay tại thời điểm mua sản phẩm.
- Quý Khách Hàng liên hệ ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG để được hỗ trợ đăng ký bảo hành điện tử bằng

ứng dụng nghiệp vụ do Đại Việt cung cấp.

(*) Khuyến cáo: Quý Khách Hàng nên sử dụng hình thức này để chắc chắn hàng mua là Sản Phẩm Chính Hãng do Đại Lý chính thức của Đại Việt phân phối.

► Qua kênh Tổng Đài **1800 60 80 (miễn phí)**

Bước 4: Nếu mã hợp lệ, tin nhắn xác nhận sẽ được gửi đến số thuê bao di động Quý Khách Hàng đã đăng ký với nội dung:

"CHUC MUNG QUY KHACH DA KICH HOAT THANH CONG SAN PHAM CHINH HANG CUA DAI VIET - Thoi han bao hanh den: dd/mm/yyyy (*)"

Để tra cứu thông tin bảo hành của sản phẩm, vui lòng truy cập **bhdt.tapdoandaiviet.com.vn**



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Lô F1 Đường số 10, CCN Hải Sơn, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Hotline 1800 60 80 | **Website** www.tapdoandai viet.com.vn